

Spyledekontaminator - Vaskedekontaminator

1. Hensikt

Sikre gode og hygieniske rutiner for daglig drift og vedlikehold av dekontaminatorer og kvalitetsmessig opplæring av ansatte i bruk og vedlikehold.
Oppnå god nok rengjøring og desinfeksjon, for å hindre smittespredning.

2. Ansvar

Leder har ansvar for at det foreligger rutiner og prosedyrer.

Leder har ansvar for at gjeldende rutiner og prosedyrer er kjent for ansatte og at det gis opplæring i arbeid på skyllerom.

Alle som arbeider eller utfører renhold på skyllerommet har ansvar for daglig bruk og renhold.

3. Generelt

En spyledekontaminator (bekkenspyler) har kun kortprogram for spyling og desinfeksjon primært av bekken, urinflasker og bøtter, og kan benyttes som utslagsvask.

En vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin) skal **IKKE** benyttes som utslagsvask. Denne har program for rengjøring og desinfeksjon av flergangsutstyr som vaskefat, pinsetter, tenger og lignende. Utstyr/instrumenter som skal steriliseres skal først rengjøres og desinfiseres i en vaskedekontaminator.

4. Fremgangsmåte

Daglig kontroll av spyledekontaminator:

- Sjekk at vaskehoder roterer fritt og dyseåpninger er frie for fremmedlegemer. Spyledekontaminatoren har to vaskehoder, et i bunn og et i toppen. På noen maskiner sitter vaskehodene i bunnen fast, derfor setter det seg enda lettere fast smuss i disse. Disse må holdes rene.
- Enkelte maskiner har bunnbøyle, denne skal rengjøres ved behov.
- Se at det er såpe i såpekannen som står i et rom nederst i maskinen eller nede ved siden av maskinen.
- Maskinen vaskes utvendig en gang pr uke, oftere ved tilsøling.
- Sørg for:
 - Riktig plassering av utstyr/gods i maskinen for sikker rengjøring og desinfeksjon.
 - Riktig bruk av innsatser/kurver.
 - Gjøre seg kjent med frontpanelet.
 - Lære å stenge vanninntaket
 - Lære å tolke feilmeldinger og hvem som skal kontaktes.

Daglig kontroll av vaskedekontaminator:

- Sjekk at vaskearmene roterer fritt, og alle dyseåpninger er frie for fremmedlegemer.
- Klappventilen kan trykkes lett inn og ut.
- Bunnfilter renses for smuss ved å løfte opp hele holderen med håndtaket som er bøyd over filteret skyll det i utslagsvasken.

- At kanner med såpe og avspenningsvæske som står i skuffen nederst i maskinen ikke er tomme.
- Vaske maskinen utvendig en gang pr. uke, oftere ved tilsøling.
- Sørg for:
 - Riktig plassering av utstyr for sikker rengjøring og desinfeksjon
 - Riktig bruk av innsatser og stativer
 - Riktig håndtering av kirurgiske instrumenter. Instrumenter skal være demontert og åpnet.
 - Gjøre seg kjent med frontpanel og brytere – velge riktig program i forhold til oppgaven maskinen skal utføre.

Teknisk kontroll bør gjennomføres årlig for alle dekontaminatorer.

SPYLEDEKONTAMINATOR - DAGLIG SJEKKLISTE:

Listen skal finnes på desinfeksjonsrommet og signeres daglig

Daglig sjekk omfatter:

- Kontroll av vaskehoder
- Kontroll av dyseåpninger
- Kontroller ev at bunnbøylene er ren
- Kontroller at det er såpe på kannen

Maskinens IDnr:

År:

Uke	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag

VASKEDEKONTAMINATOR (instrumentvaskemaskin) - DAGLIG SJEKKLISTE:

Listen skal henge på desinfeksjonsrommet og signeres daglig

Daglig sjekk omfatter:

- Kontroll av vaskearmer og at de roterer fritt
- Kontroller at dyseåpningene er åpne
- Rens filteret i bunnen
- Kontroller at det er såpe og avspenningsvæske på kannene i maskinen

Maskinens IDnr:		År:						
Uke	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	

5. Referanser

- Sykehuset i Vestfold:
 - Vaskedekontaminator og spyledekontaminator. Kvalitetssikring av rengjørings- og desinfeksjonsprosessen (2015)
 - Spyledekontaminator (bekkenspyler) - daglig bruk og renhold (2018)
 - Vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin) - daglig bruk og renhold (2018)